

دليلك السريع لاستخدام NovoPen® 6

تسجيل
جرعة الأنسولين
يحدث هنا



NovoPen® 6




هذا دليل سريع. يرجى الاطلاع على تعليمات الاستخدام التي تأتي مع NovoPen® 6 للحصول على معلومات كاملة.

قم بتحضير قلم NovoPen® 6 الخاص بك

كيفية استعمال NovoPen® 6

شاهد هذا الفيديو السريع لتتعلم كيفية تحضير الحقنة وحقنها باستخدام قلم NovoPen® 6.

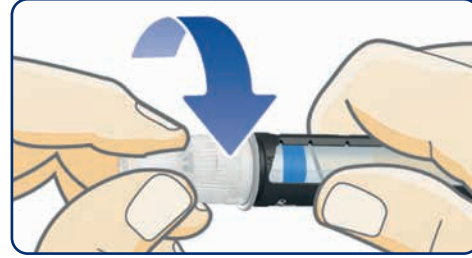

صع إبرة جديدة

مَرِّق الشريط الورقي. ادفع الإبرة بوضع مستقيم في القلم. أدنها حتى تصبح محكمة. أزل كلاً من غطاء الإبرة. احتفظ بغطاء الإبرة الخارجي.



أدخل خرطوشة أنسولين جديدة في حامل الخرطوشة مع الطرف اللولبي أولاً. لف حامل الخرطوشة وأعدده كما كان.



ادخل خرطوشة أنسولين

قم بسحب غطاء القلم. لف حامل الخرطوشة. قد يكون ذراع المكبس بارزاً، إذا كان الأمر كذلك فادفعه حتى يتوقف.

خذ حقنتك




احقن جرعتك

أدخل الإبرة. اضغط على زر الجرعة حتى يُظهر عداد الجرعة «0». عدّ ببطء إلى 6 قبل إزالة الإبرة من جلدك. قم بإزالة الإبرة بأمان وارمها بعيداً. أعد غطاء القلم.



حدّد جرعتك

اسحب زر الجرعة. تأكد من أن عداد الجرعة يُظهر «0» قبل أن تبدأ. أدّر زر الجرعة لتحديد الجرعة التي تحتاجها.

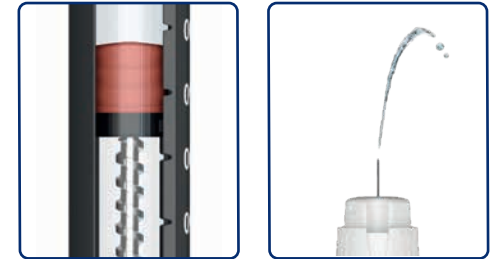

⚠ اختبر دائماً تدفق الأنسولين


حدّد وحدّتين واضغط على زر الجرعة حتى يُظهر عداد الجرعة صفراً. يكتمل فحص تدفق الأنسولين، عندما ترى الأنسولين يخرج من طرف الإبرة على شكل رذاذ ولم تعد هناك فجوة بين رأس ذراع المكبس والمكبس.

كيفية التحقق من آخر جرعة



اقرأ ذاكرة جرعتك

يُظهر المثال أعلاه 12 وحدة تم حقنها منذ 1 ساعة و 52 دقيقة و 3 ثوان.

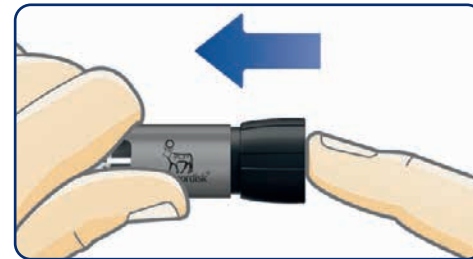

اضغط على زر الجرعة لإعادته مكانه

سُطّهر ذاكرة الجرعة الآن تفاصيل جرعتك الأخيرة.



اسحب زر الجرعة

تأكد من أن عداد الجرعة يُظهر «0» قبل أن تبدأ.

امسح رمز الاستجابة السريعة لمشاهدة الفيديو



يقدم NovoPen® 6 جرعة قصوى من 60 وحدة في زيادات بمقدار جرعة وحدة واحدة.

NovoPen® 6

NovoPen® 6 هي علامة تجارية مسجلة لشركة Novo Nordisk A/S .Novo Nordisk Pharmaceuticals Pty Ltd .ABN 40 002 879 996 .الطابق 10، 118 Mount Street، North Sydney، NSW، 2060. www.novonordisk.com.au .Novo Nordisk Customer Care (Australia) 1800 668 626 .Registered trademark of Novo Nordisk A/S © .NONOCH0039 .AU23NP600024 .تاريخ التحضير أيلول/سبتمبر 2023.

