

# NovoPen® 6 簡易操作指南

此處顯示  
胰島素  
劑量記錄



NovoPen® 6



這是一份簡易操作指南。全部資訊請參閱 NovoPen® 6 隨附的使用說明書。

## 安裝 NovoPen® 6 諾和筆



### 插入胰島素筆芯

取下筆套。擰下筆芯管。活塞芯杆可能會露出筆身。假若如此，就將其推回原位。



將新的胰島素筆芯插入筆芯管，先插入有螺紋的一端。將筆芯管擰回原位。



### 安裝新針頭


撕下標籤紙。將針頭直插到筆上並擰緊。將兩個針套取下。保留外層針套。

## 如何使用 NovoPen® 6

觀看本 NovoPen® 6 簡明操作指南視頻，學習如何安裝和完成注射。



## 注射操作

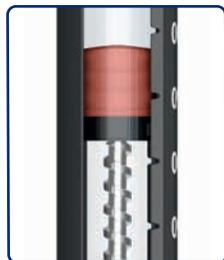

### ⚠ 務必先檢測胰島素的流動性

選擇 2 個單位並按住劑量按鈕，直到劑量顯示歸零。當看到有胰島素從針尖噴出，活塞芯杆頂端和活塞之間沒有間隙時，胰島素流動性檢測就完成了。



### 選擇劑量

拉出劑量按鈕。選擇劑量前要確保劑量顯示為“0”。旋轉劑量按鈕，選擇你需要的劑量。



稍等後慢慢數  
1-2-3-4-5-6

### 注射藥液

刺入針頭。按住劑量按鈕，直到劑量顯示為“0”。從皮膚拔出針頭前先慢慢數到六。小心地拔出針頭並丟棄。蓋回筆套。

## 如何查看你上次注射的劑量



### 拉出劑量按鈕

在開始操作前確保劑量顯示為“0”。



### 將劑量按鈕推回

現在劑量記憶顯示的是你上一次注射劑量的詳細資料。



### 讀取劑量記憶

以上示例顯示 1 小時 52 分 3 秒前注射了 12 個單位胰島素。



掃描二維碼  
觀看視頻

NovoPen® 6 最大劑量為 60 個單位，增幅為一個單位。



NovoPen® 6 是 Novo Nordisk A/S 的註冊商標。  
Novo Nordisk Pharmaceuticals Pty Ltd. ABN 40 002 879 996. Level 10, 118 Mount Street, North Sydney, NSW, 2060.  
Novo Nordisk 客戶服務 (澳洲) 電話 1800 668 626。www.novonordisk.com.au  
© Novo Nordisk A/S 的註冊商標。AU23NP600027。NONOCH0039。編制時間：2023 年 9 月。

NovoPen® 6