

La tua guida rapida per l'uso di NovoPen® 6

Impostazione
della memoria
della dose
di insulina
in corso



NovoPen® 6



Questa è una guida rapida. Consulta le istruzioni per l'uso in dotazione a NovoPen® 6 per informazioni esaurienti.

Prepara la tua NovoPen® 6



Inserisci una cartuccia di insulina

Sfila il cappuccio della penna. Svita l'alloggiamento della cartuccia. Lo stantuffo potrebbe uscire dalla penna. In tal caso, spingilo completamente all'interno finché non si blocca.




Fai scivolare la cartuccia all'interno dell'alloggiamento dalla parte dell'estremità filettata. Avvita l'alloggiamento della cartuccia.



Inserisci l'ago sulla penna

Stacca il sigillo protettivo di carta. Spingi l'ago perpendicolarmente sulla penna. Avvitalo finché non è ben stretto. Sfila entrambi i cappucci dell'ago. Conserva il cappuccio esterno dell'ago.

Fai l'iniezione

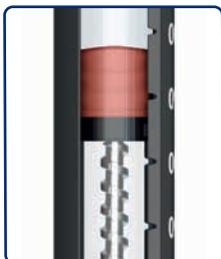

⚠ Controlla SEMPRE il flusso di insulina

Selezione 2 unità e premi il pulsante di iniezione finché il contatore della dose non indica "0". Il controllo del flusso di insulina è completo quando dalla punta dell'ago fuoriesce insulina e non vi è più spazio vuoto tra la testa dello stantuffo e lo stantuffo stesso.



Selezione la dose

Tira il pulsante di iniezione. Verifica che il contatore della dose indica "0" prima di iniziare. Ruota il pulsante di iniezione per selezionare la dose necessaria.



Inietta la dose

Inserisci l'ago. Premi il pulsante di iniezione fino a quando il contatore della dose non indica "0". Conta lentamente fino a 6 prima di rimuovere l'ago dalla pelle. Rimuovi l'ago e gettalo in modo sicuro. Rimetti il cappuccio della penna.

Come controllare l'ultima dose



Tira verso l'esterno il pulsante di iniezione

Prima di iniziare controlla che il contatore della dose sia sullo "0".



Spingi il pulsante della dose verso l'interno

Il display della memoria della dose mostrerà i dettagli dell'ultima dose.



Leggi il display della memoria della dose

The L'esempio qui sopra mostra 12 unità iniettate 1 ora, 52 minuti e 3 secondi prima.

Come usare una NovoPen® 6

Consulta questa guida rapida per imparare a preparare e a completare le iniezioni con NovoPen® 6.



Fai la scansione del codice QR per guardare il video