



NovoPen® 4

آپ کے NovoPen® 4 پر ایک نظر

ایک بار استعمال کی جانے والی سوئی



کاغذی ٹیب
سوئی
سوئی کا اندرونی کیپ
سوئی کا بیرونی کیپ

NovoPen® 4

خوراک کاؤنٹر
اپنی منتخب خوراک
دیکھنے کے لئے اسے
استعمال کریں۔


خوراک پوائنٹر



پین کیپ
انسولین کو روشنی سے
محفوظ رکھنے کے لیے
اسے ہمیشہ تبدیل کریں۔

خوراک کا بٹن
اسے موڑ کر اپنی خوراک
کا انتخاب کریں۔
اپنی خوراک کا انجیکشن
لگانے کے لیے اسے دبائیں۔

Penfill® کارٹریج

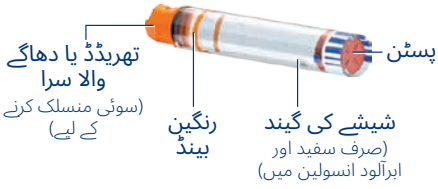

پسٹن
شیشے کی گیند
(صرف سفید اور
ایرآلود انسولین میں)
رنگین
بینڈ
تھریڈڈ یا دھاگے
والا سرا
(سوئی منسلک کرنے
کے لیے)

فوری استعمال کے لیے مرحلہ وار گائیڈ





PENFILL® کارٹریج داخل کریں اور سوئی منسلک کریں

مرحلہ 4 تھریڈڈ سرا آگے کر کے
کارٹریج داخل کریں

مرحلہ 3 اگر پسٹن کا راڈ باہر نکلا
ہو تو اس وقت تک اندر دھکیلیں
جب تک یہ رک نہ جائے

مرحلہ 2 کارٹریج بولڈر کو موڑیں




مرحلہ 1 پین کی کیپ ہٹا دیں

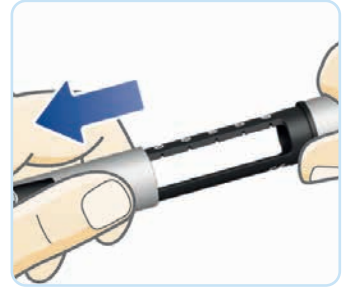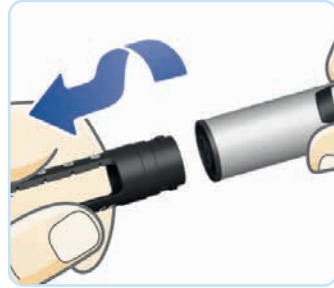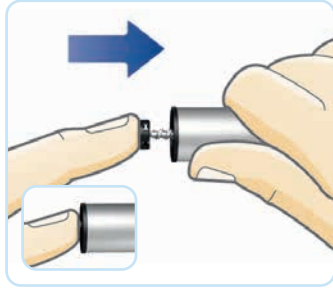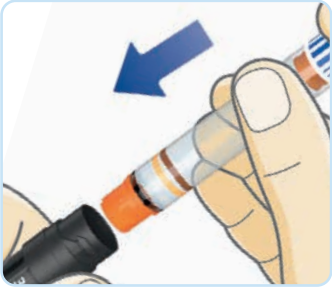

مرحلہ 7 سوئی کے بیرونی اور اندرونی کیپ
کو ہٹا دیں۔ سوئی کو محفوظ طریقے سے
ضائع کرنے کے لیے بیرونی کیپ پاس رکھیں


مرحلہ 6 نئی سوئی سے کاغذ کے ٹیب کو ہٹا
دیں اور سوئی کو سیدھا پین پر دھکیلیں

مرحلہ 5 کارٹریج بولڈر کو واپس موڑیں
جب تک کہ آپ ایک کلک نہ سنائی دے یا
محسوس نہ ہو

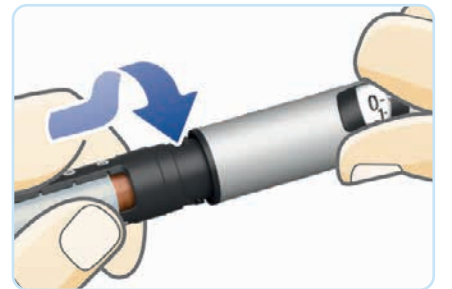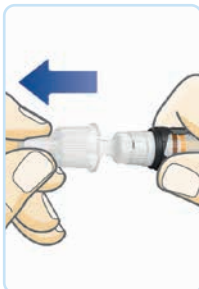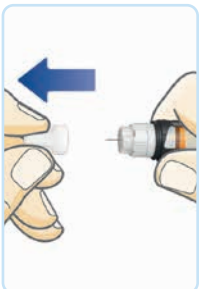

اپنے NovoPen® 4 کے استعمال کی مکمل وضاحت کے لیے، براہ کرم اپنے پین کے ساتھ دی
گئی استعمال کی ہدایات پڑھیں۔ براہ کرم اہم حفاظتی معلومات کے لیے صفحہ پلٹیں۔

PENFILL® CARTRIDGE ڈالنے کے بعد ہمیشہ انسولین کے بہاؤ کی جانچ کریں

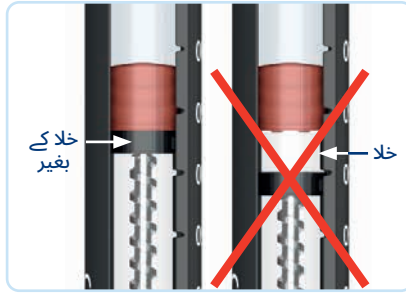

مرحلہ 1 پسٹن راڈ کے سر اور پسٹن کے درمیان موجود کسی بھی طرح کے خلا کو پر کریں اور کسی بھی طرح کے ہوا کے بلبوں کو ہٹا دیں۔

مرحلہ 2 خوراک کے ہٹن کو کھینچیں اور 2 یونٹ منتخب کریں۔

مرحلہ 3 خوراک کے ہٹن کو دبائیں جب تک کہ خوراک کا کاؤنٹر '0' ظاہر نہ کرے۔

اگر کوئی انسولین ظاہر نہ ہو یا کوئی خلا ہو تو مراحل 1 سے 3 کو تب تک دہرائیں جب تک کہ پین استعمال کے لیے تیار نہ ہو۔

اگر آپ انسولین کے بہاؤ کی جانچ نہیں کرتے تو ہوسکتا ہے کہ آپ کو انسولین کی پوری خوراک نہ ملے۔



اپنی انسولین کا انجیکشن لگائیں

مرحلہ 2 سوئی داخل کریں اور خوراک کے ہٹن کو دبائیں جب تک کہ خوراک کا کاؤنٹر 0 پر نہ آجائے۔ سوئی کو نکالنے سے پہلے آہستہ آہستہ 6 گنتی گنتی کریں۔


مرحلہ 1 خوراک کے ہٹن کو تب باہر نکالیں جب خوراک کاؤنٹر 0 پر ہو اور اتنی یونٹس کی تعداد کو منتخب کرنے کے لیے موڑیں جو آپ انجیکشن میں لگانا چاہتے ہیں۔

سوئی کو محفوظ طریقے سے نکالیں اور ٹھکانے لگائیں اور پین کی کیپ کو واپس لگ دیں۔



انجیکشن لگانے کی جگہیں

انجیکشن لگانے کی عمومی مرکزی جگہیں رانوں، پیٹ، کولہوں یا اوپری بازوؤں کے پچھلے سائیڈ پر ہوتی ہیں۔ اپنے ڈاکٹر یا نرس سے پوچھیں کہ آپ کے لیے کون سی جگہیں تجویز کی جاتی ہیں۔

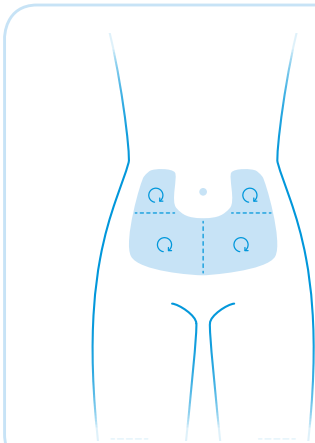


اپنی آسائش کے لیے، یہ یقینی بنائیں کہ آپ ہر بار انجیکشن کے لیے مختلف جگہ کا انتخاب کریں۔

- انجیکشن کی جگہوں کو آدھے یا چوتھائی حصوں میں تقسیم کریں اور ہر ہفتے ایک مختلف آدھے/چوتھائی حصے پر انجیکشن لگائیں۔

- ہر آدھے یا چوتھائی حصے میں، نئے انجیکشن کی جگہ پچھلے انجیکشن کی جگہ سے گھڑی کی سمت میں انگلی کی چوڑائی کے برابر آگے ہونی چاہیے۔

اپنی تجویز کردہ انجیکشن کی جگہ پر نشان لگائیں

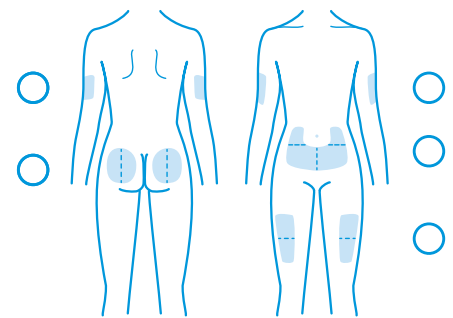

مزید معلومات یا مدد کے لیے

اپنے پین کے استعمال کے بارے میں سوالات ہیں یا تکنیکی مسائل درپیش ہیں؟ Novo Nordisk Medical Information کو کال کریں

1800 668 626 -



Novo Nordisk Pharmaceuticals Pty Ltd. Level 10, 118 Mount Street, North Sydney NSW 2060.
www.novonordisk.com.au. 1800 668 626 (آسٹریلیا) طبی معلومات (نوونوردسک) ABN 40 002 879 996
© Novo Nordisk A/S کا رجسٹرڈ ٹریڈ مارک. NONO0Y0148. AU24NP400018. اکتوبر 2024.

NovoPen® 4